

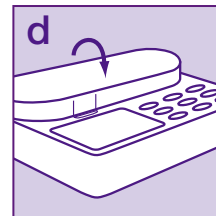
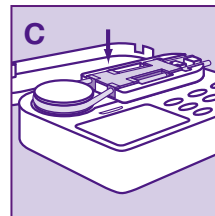


FLOCARE® INFINITY™

– kortfattet bruksanvisning

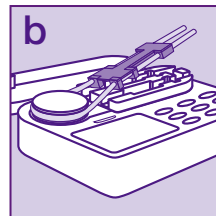

- 1 FloCare® Infinity™ pumpen tilkobles lysnettet eller brukes ved hjelp av det oppladbare Lith-Ion batteriet. (Ladetid ca. 6 timer).
- 2 Koble FloCare® ernæringssett til sondematen. Manuell fylling av sett: Klem forsiktig på siden av kassetten som er merket med en dråpe . Dette gjøres før settet tilkobles pumpen. Automatisk fylling av sett: Trykk to sekunder på **FILL SET**-knappen. (Utføres etter at kassetten er plassert i pumpen).
- 3 Sett inn FloCare® ernæringssett i pumpen. Følg diagrammene a, b, c og d.

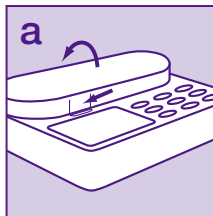

- 4 Pumpen startes/stoppes ved å trykke 2 sekunder på **ON/OFF** knappen.
- 5 Velg ønsket program:
Kontinuerlig tilførsel:



Innstille en dose:



OBS! Viktig å trykke **CLR** mellom hver dose.

Ulike spesialfunksjoner:

- **INFO** Denne knappen viser gitt volum.
- **CLR** Det som vises i displayet nullstilles. (Se side 9 i bruksanvisningen).
- Venteposisjon – ved å trykke **START/STOP** mens pumpen er i gang, stoppes pumpen midlertidig. Nytt trykk, og pumpen starter igjen. Pausene er på 3 minutter.

Forhåndsinnstillinger

- Justere volumnivå
- Stum alarm ved inngått dose
- Låse tastatur
- Permanent lys i display

NB! Kun autorisert helsepersonell har tillatelse til å endre innstillinger. [Les mer i bruksanvisningen.](#)



PROBLEMLØSNING

Dette skjemaet kan benyttes for å løse de vanligste problemene



Feil	Årsak	Løsning
NO SET	Settet er ikke korrekt plassert.	Stopp alarm START/STOP. Koble til settet på nytt (Følg anvisningene nøye).
	Sensormrådet er skittent.	Rengjør sensorene. Koble settet til pumpen.
PUSH STRT	Pumpen har stått i ventemodus i mer enn 3 minutter.	For fortsatt ventemodus, gi et nytt trykk på START/STOP. Fortsette innstille program – trykk to ganger START/STOP.
END OF DOSE	Innstilt volum er gått inn.	Slå av pumpen ved å trykke ON/OFF i to sekunder.
AIR	<ul style="list-style-type: none">• Luft i ernæringssettet.• Luftsensormrådet er skittent.• Settet er ikke korrekt plassert.	<ul style="list-style-type: none">• Stopp alarm ved å trykke START/STOP.• Ved tom pose bytt til ny sondeløsning.• Rengjør sensorer.• Plassere kassetten på nytt.
BATT	Batterikapasiteten er for lav.	Sett pumpen til lading. Pumpen kan benyttes mens den lades.
BATT "E" OG "F" LYSER	Batterifeil.	Slå av pumpen. Pumpen må til service for skifte av batteri.
FILL SET	Pumpen fyller ernæringssettet.	Trykk på FILL SET en gang til for å stoppe fylling.
OCC IN	<ul style="list-style-type: none">• Okklusjon oppstrøms. Okklusjonen befinner seg mellom pumpen og beholder for sondemat.• Trykksensorene er skitne.	<ul style="list-style-type: none">• Trykk START/STOP for å stoppe pumpen. Fjern settet fra pumpen, og undersøk settet ved å skylle gjennom. Koble til sett på nytt, og start pumpen.• Rengjør sensorer og start pumpen på nytt .• Tøm settet for luft ved å trykke FILL SET knappen.
OCC OUT	<ul style="list-style-type: none">• Nedstrøms okklusjon. Okklusjonen sitter mellom pumpe og pasient.• Trykksensormrådet er skittent.• Treveiskranen står i lukkeposisjon.	<ul style="list-style-type: none">• Stopp alarm ved å trykke START/STOP. Sjekk settet og sonde for blokkering ved å aspirere væske gjennom medisinporten.• Rengjør sensorene, koble til settet på nytt og start pumpen.• Åpne settet med treveiskranens piler i riktige retninger.
LOCK	Tastelås er på. Kun dette programmet skal benyttes.	Den som har ansvar for administreringen av mating må koble fra tastaturlåsen om det ønskes.
ERRA	Selvtestingen fant en elektronisk feil.	Slå av pumpen. Se til at lokket er ordentlig lukket, og start pumpen igjen. Dersom ERRA-symbolet fortsatt vises bør pumpen inn til service.