

	DATO:			DATO:			DATO:			DATO:			DATO:			DATO:		
Klokkeslett																		
Kassettvolum ml																		
Enheter ml																		
Kont hastighet ml/t																		
Bolus mengde ml																		
Sperretid																		
Bolus akseptert																		
Bolus forsøkt																		
Totalt infundert ml																		
Luft Detektor																		
Gj. Strøm Sensor																		
Låse nivå																		
<b>Sign. sykepleier</b>																		
<b>Sign. sykepleier</b>																		
Skiftet batteri (x 1/uke)																		

	DATO:			DATO:			DATO:			DATO:			DATO:			DATO:		
Klokkeslett																		
Kassettvolum ml																		
Enheter ml																		
Kont hastighet ml/t																		
Bolus mengde ml																		
Sperretid																		
Bolus akseptert																		
Bolus forsøkt																		
Totalt infundert ml																		
Luft Detektor																		
Gj. Strøm Sensor																		
Låse nivå																		
<b>Sign. sykepleier</b>																		
<b>Sign. sykepleier</b>																		
Skiftet batteri (x 1/uke)																		

<b>Følg pumpens bruksanvisning</b>		
Programmering og endring av pumpens innstillinger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmeres av lege, låses i Låse nivå 1</li> <li>• Sykepleier kan gjøre ordinerte endringer i Låse nivå 1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt vakthavende lege på Sunniva ved behov for hjelp, eventuelt vakthavende anestesipersonell</li> </ul>
Kontroll	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle innstillinger og endringer kontrolleres av to kvalifiserte personer opp mot legens ordinasjon i medikamentkurven</li> <li>• Pumpen kontrolleres på hver vakt, dokumenteres på skjema</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroll av pumpen innbefatter rett innstilling i henhold til legens ordinasjon i medikamentkurven og at infundert mengde medikament samsvarer med siste kontroll</li> </ul>
Luftdetektor og gjennomstrømssensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alltid på</li> </ul>	
Batteri	Skiftes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• før hver pasient</li> <li>• x 1/uke</li> </ul>	
Etter bruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasset/deksel skal være montert, for å beskytte pumpen</li> <li>• Pumper returneres Seksjon for behandlingshjelpemidler (eksterne) eller til anestesivdelingen (interne)</li> </ul>	

## 1 Lenker til relaterte dokumenter

[D05130](#)

Kortversjon bruksanvisning Cadd-Legacy PCA

[D05334](#)

Operatørmanual CADD-Legacy PCA