

Rekvirentkode
Rekvirentens navn
og adresse

Fødselsnr

Navn

Adresse

Poststed

Kvinne Mann

Prøven tatt dato

kl

Prøvetaker

Klinisk problemstilling:

Analyse:

IGRA-TB (Quantiferon-TB)

Inkubering:

Fra: Dato: _____ Klokkeslett: _____

Til: Dato: _____ Klokkeslett: _____

Prøven er:

Usentrifugert

Sentrifugert (prøven må oppbevarast **og transporterast** kjøleg)

IGRA-TB (Quantiferon)

Prøvetaking og prøvehandtering

Prøvetaking

- Prøve skal takast med standard venepunksjon
- Frå kvar pasient skal det tappast blod på 3 spesialrøyr med høvesvis grå, raud og lilla kork
- Kwart røyr skal fyllast med 1 ml blod. Feil prøvevolum kan føre til feil analyseresultat. Vakuemet i røyret sikrar korrekt blodvolum
 - Ved bruk av butterfly-kanyle skal det først tappast eit kasteglas for at vakuemet i prøverøyrret ikkje skal bli øydelagt av lufta i slangen
 - Røyra trekkjer blodet relativt sakte, så lat dei få 2 – 3 sekunder ekstra på nåla etter at dei tilsynelatande er fylt opp
 - Ein svart strek på prøverøyrret markerer korrekt fyllingsvolum
 - Røyra kan fyllast i valfri rekkefølge

Prøvehandtering etter at prøven er tatt

Prøverøyrret inneheld heparin og antigen. Det er viktig at blodprøven blir blanda godt med desse komponentane.

- Rett etter at prøven er tatt, skal røyra ristast 10 gangar. Ristinga skal vera så kraftig at den innvendige overflata av røyret er heilt dekkja av blod, men ein må unngå å rista så kraftig at gelproppen slepper taket i røyret.
- Prøven skal inkuberast snarast mogeleg – og seinast 16 timar etter prøvetaking.
 - Dersom prøven ikkje blir inkubert med ein gang etter prøvetaking, skal den oppbevarast ståande ved 17 °C – 27 °C . Innhaldet skal også blandast på nytt (sjå ovanfor) like før den blir sett inn i inkubatoren
 - Inkubasjonstemperatur: 37 °C
 - Inkubasjonstid: 18 – 24 timar
- Etter inkubering skal prøve som hovudregel sendast usentrifugert til Mikrobiologisk avdeling.
 - Laboratorium som kan sørgja for kjøletransport av prøven og som gjer særskilt avtale med Mikrobiologisk avdeling om det, kan sentrifugera prøven før sending.
 - ✓ Usentrifugert prøve skal oppbevarast mellom 2 °C – 27 °C og er då haldbar i 72 timar etter avslutta inkubasjon.
 - ✓ Sentrifugert prøve skal oppbevarast kjøleg (mellom 2 °C – 8 °C), **også under transport til laboratoriet** og er då haldbar i 4 veker.

Meir informasjon

- www.analyseoversikten.no (søk etter IGRA-TB)

Instruksjonsvideo om prøvetaking og pre-analytisk handtering av prøven: <http://youtu.be/neBY4woLc6c>

