



IPV-2C med O2-mikser: Enkel veileder

Før oppstart behandling, følg bokstavene fra A til B, deretter tallene fra 1 til 7. Innstillingene henger sammen, og ved å endre et element fra A/B/C/D, vil alle bli påvirket. Ved oppstart på voksne begynner med alle innstillinger med pil opp. Ved oppstart barn, reduseres C og D til minimum. Deretter tilpasses behandlingen individuelt. Observer pasienten, og sjekk multimeter underveis.

A. Koble til Oksygen- og luftslangene til vegguttak eller gassflasker.

Mikser (B) piper kraftig dersom bare en gass er tilkoblet. Skal alltid være koblet fra når maskinen ikke er i bruk, for den lekker oksygen i rommet når den er plugges i.



B. Oksygen- og luftmikser. Still inn ønsket Oksygenprosent/FiO2 ved å vri bryteren mot høyre.

Dersom pasienten bruker O2, kan du regne antall liter om til FiO2.

5. grønn "C" knott justerer flow (stige tid på perkusjoner) = Øk forsiktig til ønsket bevegelse er på brystkassen.

6. Gul "D" knott = innstilling av CPAP-trykk. Normalt ved oppstart behandling voksne: pil opp, eller barn: minimum. Minke for å redusere respirasjonsarbeid. Dersom det er ønskelig å øke CPAP, og pasienten synes det er for tungt å puste, kan reduksjon av flow (C-knapp) prøves for å minke respirasjonsarbeid.

FiO2-omregner

Liter O2	FiO2
1	24%
2	28%
3	32%
4	36%
5	40%
6	44%
7	48%
8	52%
9	56%
10	60%

Multimeter:
Visning av behandlingsinnstillingene:

Amplitude ... **31** ... Gj.snitt trykk
Bruk tid ... **1:03** ... Frekvens

NB! For å lese av tallene på skjermen, Dekk til Phasitron-utgang. Tallene kommer først frem i skjermbildet etter 16 sekunder med motstand. Ser alt bra ut, fjern tildekking og koble på pasient.



7. "A" knott = i:e-ratio. Stilles til pil opp. Kun denne innstillingen skal brukes pr i dag.



"B" knott = frekvens.
Obs! Ved endring på den ene påvirkes den andre. Normalt ved oppstart, stilles med pil opp. For å påvirke mer perifert, øke frekvensen over 250. For å påvirke mer sentralt, reduseres frekvensen til under 250.

4. Vipp bryter opp for å starte forstøver. Bruk som hoveddreiel alltid forstøver. Beregn ca. 1 ml 0.9 % saltvann per minutt behandlingen skal pågå.

3. Still inn drivtrykket til mellom 30-40 PSI til voksne, 20 PSI til små barn, og 25 PSI til større barn. NB! Avlesning drivtrykk øverst. Bryter til å endre på drivtrykk nederst.

2. For oppstart; vri av/på bryter til ON

1. Sett sammen Phasitron. Koble på slangene til IPV og Phasitron. Phasitron demonteres og skylles i springvann, og legges til tork etter hver bruk.

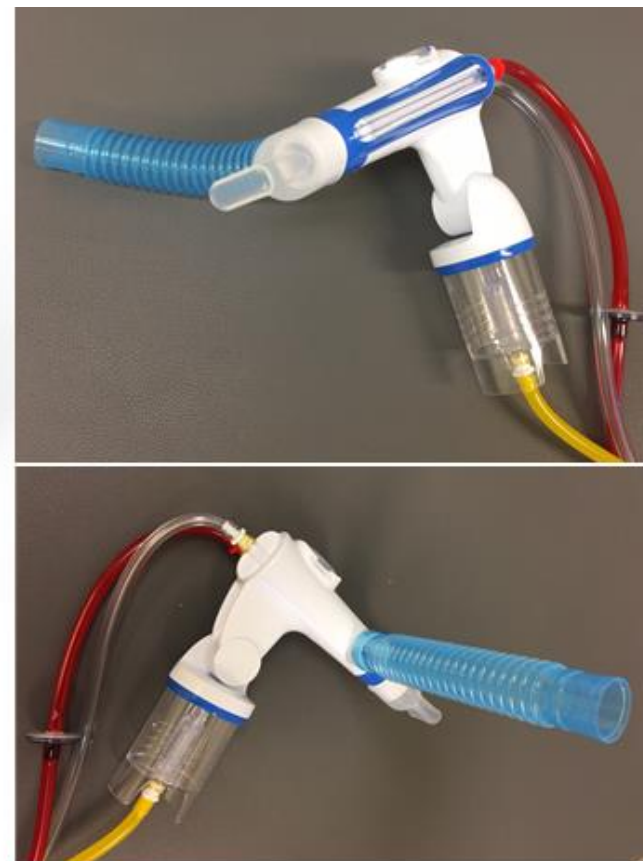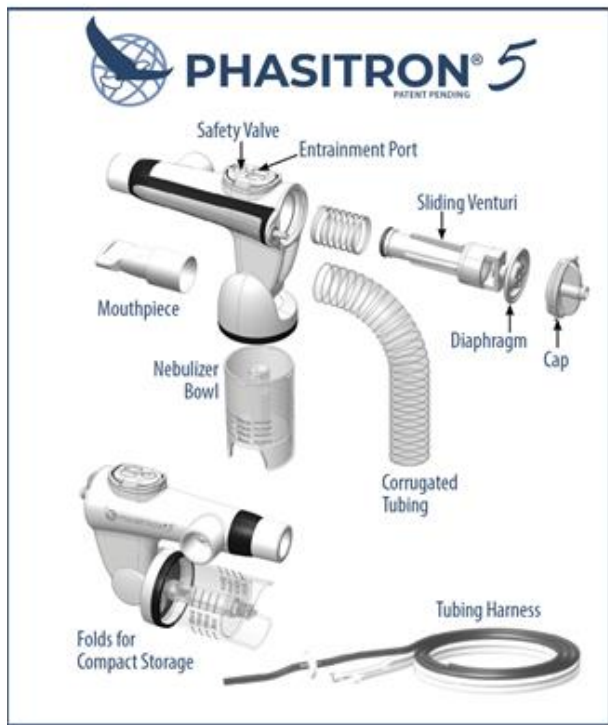

Sett sammen Phasitron. Koble på slange ne til Phasitron.
Phasitron demonteres og skylle i springvann, og legges til tork etter hver bruk.